

吸入笑气镇痛装置 A8 简易操作流程

➤ 开机

点击设备左下角开机按钮（如图 1 所示），设备开始启动。

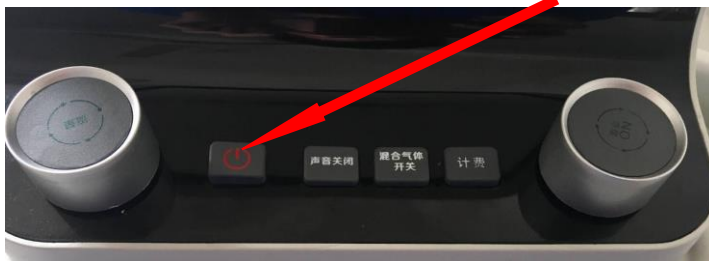


图 1

➤ 镇痛模式，计费模式设置和调节幅度设置以及报警气压设置

点击主界面上的模式管理（如图 2 所示），可进入镇痛模式设置界面（如图 3 所示），通过点击图 3 界面上的数字参数可进入图 4 相应界面进行设置，设置完成后点击保存即可。同样的，可在模式管理里面对计费模式进行设置。调节幅度设置是设置浓度和气体流量调节的幅度大小（如图 5 所示）。报警气压设置用来设置氧气和笑气的气压报警上下限（如图 6 所示）。

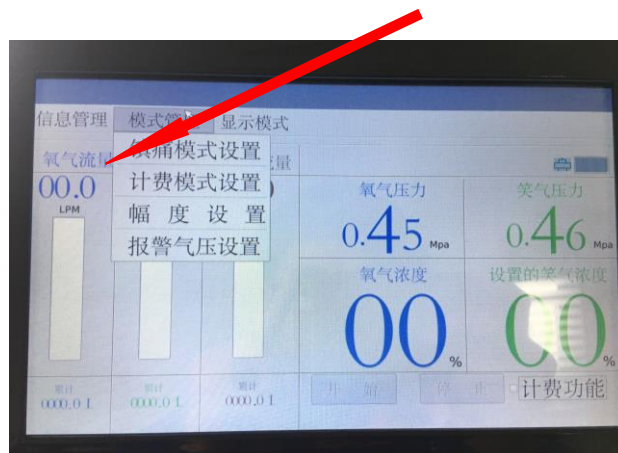


图 2

序号	模式名称	混合流量LPM	氧气浓度(%)	选择
1	a	8.0	70	模式1
2	b	6.0	70	模式2
3	c	5.0	20	模式3
4	d	5.0	10	模式4
5	e	6.0	60	模式5
6	f	10.0	40	模式6
7	g	10.0	30	模式7
8	h	10.0	20	模式8
9	i	10.0	10	模式9
10	j	10.0	50	模式10

图 3



图 4

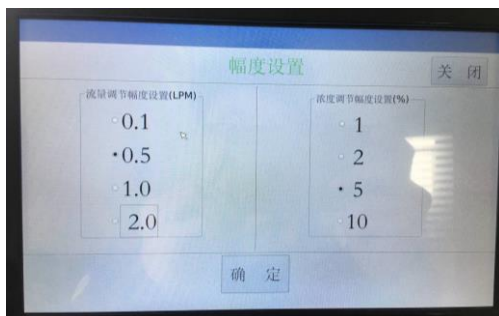


图 5



图 6

➤ 显示模式设置

点击主界面上的显示模式（如图 7 所示），可进入显示模式设置界面。本设备有三种显示模式分别如图 8，图 9，图 10。而且在图 10 显示模式界面可对笑气浓度和混合气体流量进行设置，而每次点击设置的幅度，由模式管理里面的幅度设置决定。

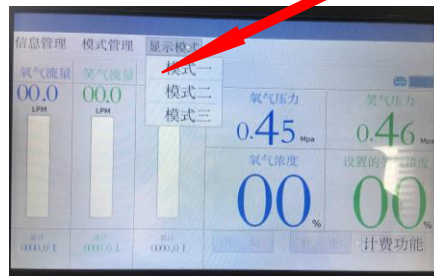


图 7



图 8

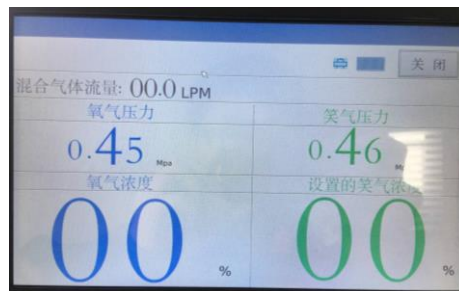


图 9



图 10

➤ 患者信息输入，查询和删除

每位患者使用该镇痛系统时，可对患者的信息进行输入，并选择相应的镇痛和计费模式，在主界面信息管理菜单，可分别对患者信息进行输入、查询和删除。如图 11 所示。

信息输入界面如图 12 所示，通过触摸相应部分可对患者信息进行输入。

精确查询主要是通过患者姓名进行查询，如图 13 所示。

查询|删除主要是查询所有患者记录或者删除，如图 14。

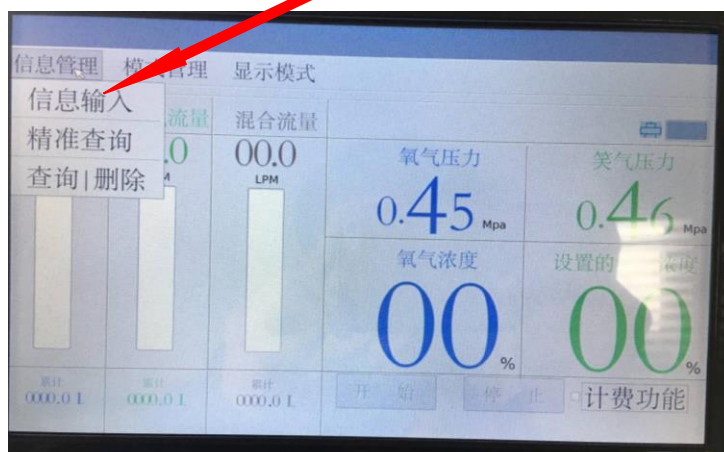


图 11

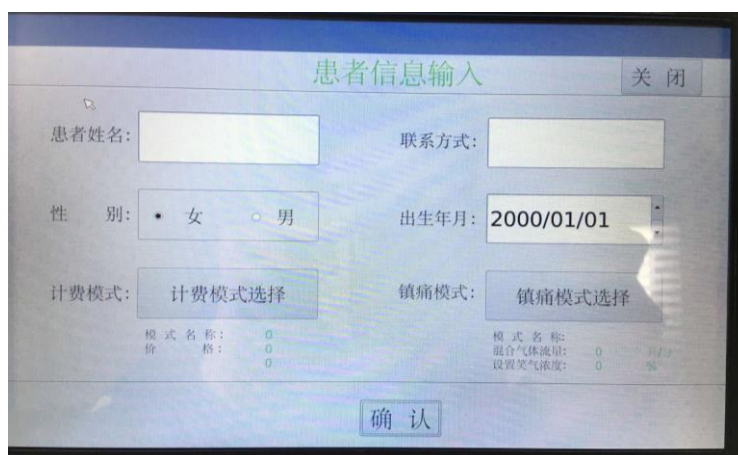


图 12

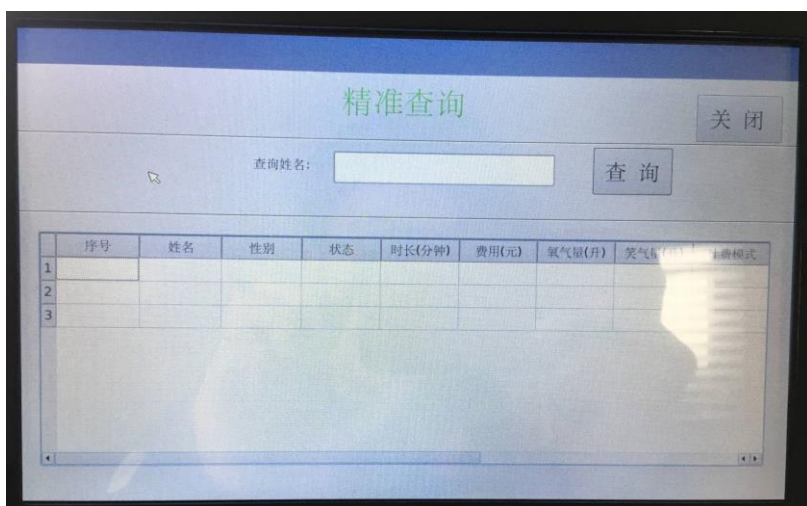


图 13



图 14

➤ 计费开始和停止

在设置好计费模式后，一是通过计费按键进行计费（如图 15），二是通过点击主界面上的计费按钮后再点击开始进行计费（如图 16）。计费完成后，再次按下计费按键或者点击停止进行结算。

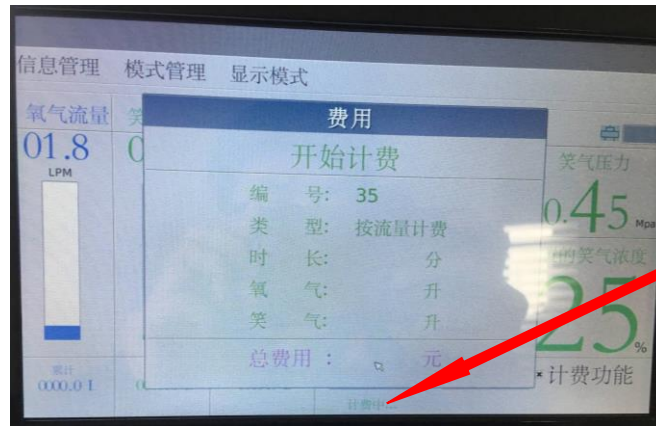


图 15

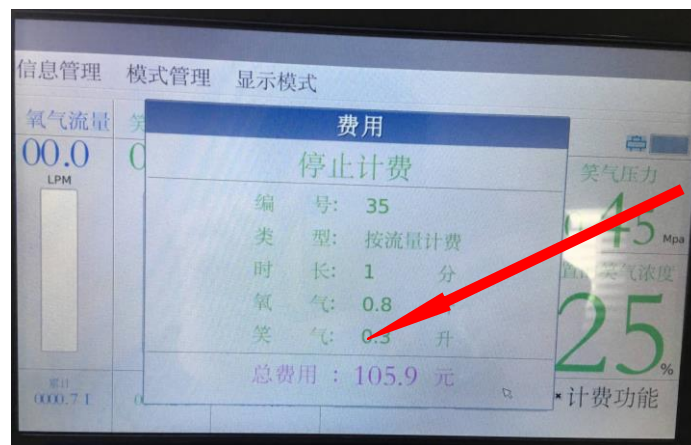


图 16

另外，如果患者在镇痛过程中，感觉不适，也可通过设备下方的四个按键和两个旋钮，对镇痛方式进行及时调整（如图 17 所示）。



图 17

注：使用该设备时，先调节流量，在调节浓度，旋钮调节时不宜过快！！！！